

CORPORAL



Lipólisis cavitacional

Ultracavitación para el tratamiento de la celulitis y la grasa localizada.

Tecnología selectiva no invasiva de ondas ultrasónicas de baja frecuencia combinada con la máxima potencia permitida y electrónica europea de última generación. Un potente equipo diseñado para actuar selectivamente con máxima seguridad y gran efectividad.

Los resultados se aprecian desde la primera sesión.

EFFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA CAVITACIÓN:

La cavitación se produce cuando el sistema aporta ondas ultrasónicas de baja frecuencia entre 29Khz y 39Khz.


Esta terapia se denomina "Cavitación Acústica". El paciente percibe el ruido que provoca la resonancia de los tejidos cuando se someten a estas vibraciones ya que las ondas son transportadas a través de los fluidos corporales.

La cavitación acústica proyectada contra los tejidos adiposos, crean micro burbujas de vapor en las áreas intersticiales entre las células grasas.

Las burbujas se contraen y expanden hasta que sufren un colapso repentino. Al implosionar, provocan ondas de choque que dañan selectivamente las membranas de los adipocitos.

La grasa junto a los líquidos se liberan y entran en la circulación linfática y sanguínea que permiten su metabolización. A este método se le denomina "lipólisis" o "lipocavitación".

Cavitación a nivel microscópico:

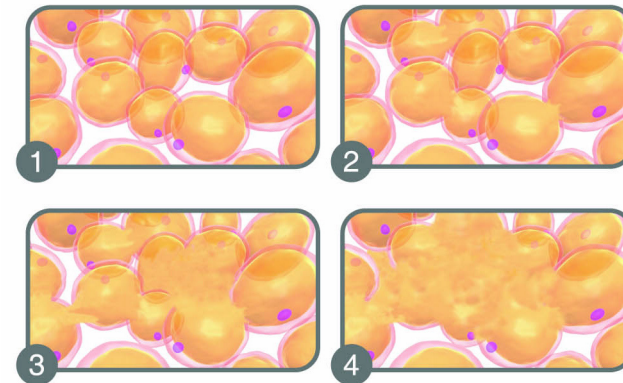

Utilizando potencias elevadas con tiempos prolongados, se pueden colapsar las moléculas y producir la destrucción de las sustancias; a este fenómeno se lo denomina "cavitación".

TECNOLOGÍA:

El uso de aleaciones especiales, evitan que el cabezal se sobrecaliente. El diseño ergonómico de los manípulos plano y focalizado, evitan la fatiga y facilitan el tratamiento.



Los transductores, la potencia del equipo (120W) y la excelente electrónica, nos permiten generar unas ondas ultrasónicas muy eficaces que destruirán los adipocitos. La medición electrónica de grasa corporal permite realizar un control y seguimiento del proceso.

INDICACIONES:

Adiposidades, Celulitis Fibrosa, Celulitis Edematosa, Celulitis Fibro-esclerótica.

RESULTADOS INMEDIATOS Y VISIBLES:

El equipo permite seleccionar dos formas de operar: Grasa o Celulitis, dependiendo del tipo de problema a tratar.

Se comienza a trabajar la zona estableciendo una serie de parámetros de acuerdo con las instrucciones mencionadas en el manual.

Los resultados son apreciables y visibles desde la primera sesión con una disminución en centímetros de la zona tratada, mejorando el aspecto y el tono de los tejidos con una reducción gradual de la antiestética "piel de naranja".

Una tecnología no agresiva que obtiene resultados sorprendentes redefiniendo las formas en un corto espacio de tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	220-240V 50Hz
POTENCIA	120W (5W/cm ²)
CAVITACIÓN	2 Manípulos, plano y cóncavo
FRECUENCIA	29-39Khz
NORMATIVA ELECTROMEDICA	CEI EN 60601.1 y 1.2
PANTALLA	LCD
MEDIDAS	250X500X450mm (fácilmente transportable)
PROGRAMAS	2, cavitación en profundidad o en superficie.
SEGURIDAD	Certificado CE, ISO 9001, ISO 13485, Fabricado en la UE



DISDERMA

TECNOLOGÍAS MÉDICO ESTÉTICAS

www.disderma.com